
Guia Rápido spinit[®] HbA1c





Aba adesiva e

Entrada da amostra

Controlo de Qualidade interno

Bolsa de Reagente

1



- Retirar o teste do frigorífico e esperar que este atinja a temperatura ambiente;
- Clicar no botão "Iniciar" e seguir as instruções no ecrã spinit®;
- Ler o código de barras do teste e em seguida preparar o disco:

- Retirar o disco da saqueta e levantar a aba adesiva;
- Colocar o disco numa superfície plana com a etiqueta virada para cima;
- Pressionar a bolsa de reagente com o dedo polegar;

- Massajar o dedo e desinfetar a área a picar;
- Após picar o dedo, limpar a primeira gota de sangue;
- Recolher a amostra necessária (5µL) na segunda gota de sangue e deixar o sangue subir até atingir a linha indicadora do tubo capilar;



Amostra insuficiente



Amostra suficiente

- Inserir a amostra de sangue no disco (zona de entrada) e pressionar ligeiramente a parte superior do tubo capilar;
- Ao colocar a amostra no disco, não deixar de pressionar o tubo capilar;
- Após uso, descartar o tubo em local próprio;
- Selar o disco retirando a protecção da aba adesiva e fechar o disco com um movimento do centro do disco até à ponta;

2



Não apertar/pressionar o tubo capilar enquanto a recolha de sangue está a ser feita

- Clicar no botão "Seguinte" do ecrã do spinit®;
- Colocar o disco no equipamento e seguir as instruções do ecrã;
- Aguardar alguns minutos pelos resultados;
- Descartar o disco em local próprio.

3

